

ACTIMATT

TECHNOLOGIE VON ACTICOM

AKTIVIERUNG DES ÜBERWACHUNGSSYSTEMS
MIT SENDER UND EMPFÄNGER

1 SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch der ACTIMATT muss diese Anleitung komplett gelesen werden. Sie ist zur späteren Wiederverwendung aufzubewahren. Bei Produkt-, Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

HINWEISE FÜR DAS PFLEGEFACHPERSONAL

- Die ACTIMATT dient lediglich zur Unterstützung des Pflegefachpersonals, ersetzt dieses jedoch nicht.
- Vor jedem Einsatz ist die ACTIMATT auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
- Die Anwendung des Actimattsensors gehört zu den «bewegungseinschränkende Massnahmen» und sein Einsatz muss gemäss den Vorgaben «bewegungseinschränkende Massnahmen» erfolgen.
- Die Einrichtung wird nur von Fachpersonen durchgeführt.

2 PRODUKTBESCHREIBUNG


1 ACTIMATT-MATRATZE

Inkl. Inkontinenz- und Baumwollschutzbezug. Die Bezeichnungen S und M sind auf der Matratze und auf dem Inkontinenzbezug vermerkt. Bezeichnung **M** zeigt die mittelharte Matratzenseite, die Bezeichnung **S** die weiche, weichere Seite der Matratze.

1.1 ANSCHLUSS FUNK-SENDER

Anschluss für Sender befindet sich in der ersten seitlichen Öffnung der ACTIMATT-Matratze.

1
Actimatt-
Matratze

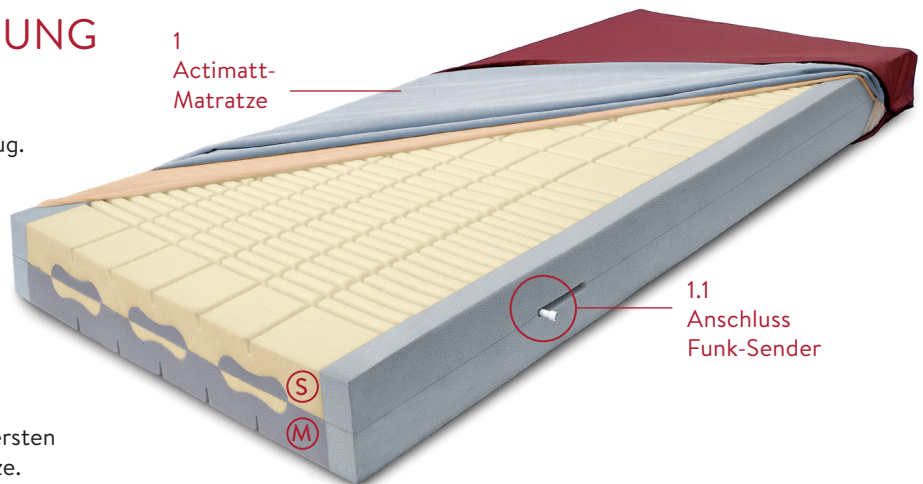

1.1
Anschluss
Funk-Sender

2
Aktivierungskoffer



2.1
Funk-Empfänger



2.2
Funk-Sender



2 AKTIVIERUNGSKOFFER

Koffer mit Sender und Empfänger für die Aktivierung des Systems. Koffer ist an der rechten Lasche mit einer Seriennummer versehen.

2.1 FUNK-EMPFÄNGER

RC07 Funk-Empfänger mit Anschluss für die Rufanlage. **Option:** mit Stromnetzteil an Spiralkabel. Funk-Empfänger ist an der Seite mit einer Seriennummer versehen.

2.2 FUNK-SENDER

Der Funk-Sender ist für die Aktivierung des Systems an der ACTIMATT-Matratze (Anschluss Funk-Sender) anzubringen. Im Sender befindet sich eine 3V-Batterie CR2032. Die Seriennummer befindet sich auf dem Schutzgehäuse des Funk-Senders.

3 INBETRIEBNAHME / AKTIVIERUNG

3.1 VOLLSTÄNDIGKEITSKONTROLLE

Vergewissern Sie sich als erstes, ob das System vollständig ist. Gehen Sie hierfür die Komponenten unter **Punkt 2** durch. Die Abbildungen dienen der Veranschaulichung.

Kontrollieren Sie bitte **DRINGEND**, ob die Seriennummer aller Komponenten (Koffer, Funk-Empfänger, Funk-Sender und falls vorhanden: Pflege-Funktionsschalter) miteinander übereinstimmen.

Achtung: Wenn die Serien-Nummern nicht miteinander übereinstimmen, wird das System **nicht funktionieren**.


3.2 SENDER ANSCHLUSS

Öffnen Sie den Matratzenüberzug sowie den Baumwollschutzbezug, sodass Sie die (erste) Sensorenöffnung seitlich der ACTIMATT-Matratze gut erreichen. In der (ersten) Sensorenöffnung befindet sich der Anschluss Funk-Sender (1.1).

Öffnen Sie nun den Aktivierungskoffer und nehmen Sie den Funk-Sender (2.2) heraus. Drücken Sie die Dreikappe des Sender-Steckers nach hinten so dass die rote Abdichtung auf dem Sender-Stecker sehen können.



Schliessen Sie nun den Funk-Sender (2.2) an den Anschluss Funk-Sender (1.1) an. Achten Sie dabei auf die Passform des Steckers und drücken Sie diese bis zum Anschlag aneinander.

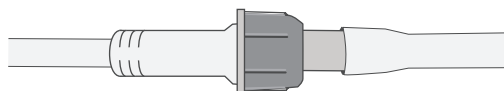

Drehen Sie anschliessend die Drehkappe des Sender-Steckers zu.

3.3 EMPFÄNGER ANSCHLUSS

Nehmen sie den Funk-Empfänger (2.1) aus dem Koffer. Schliessen Sie den Funk-Empfänger an die Rufanlage an.

Option mit Stromnetzteil: Schliessen das Stromnetzteil am Ende des Spiralkabels an einer Steckdose an. Sobald die linke Lampe des Funk-Empfängers permanent grün leuchtet ist das System aktiviert.

Achtung: Achten Sie darauf, dass der Funk-Empfänger / Schwesternrufanlage-Stecker (evtl. auch Stromsteckdose) ausser Griffweite und evtl. auch ausser Sichtweite des Patienten / Bewohners platziert sind.

3.4 FUNKTIONS-KONTROLLE


Um die Funktionskontrolle durchzuführen belasten Sie die ACTIMATT-Matratze mit Gewicht, z.B. darauf Sitzen.

Die Belastung muss mindestens 3 Sekunden lang stattfinden. Danach kann die Matratze verlassen werden (Gewicht-Entlastung) dabei wird ein Rufsignal an die Rufanlage gesendet.

Wenn das Rufsignal über die Rufanlage angezeigt wurde ist das System aktiviert und einsatzbereit.

OPTIONALER ZUSATZ: PFLEGE-FUNKTIONSSCHALTER

Mit der Taste **OFF** (15 Min.) am Pflege-Funktionsschalter kann die Ruffunktion der Actimatt Matratze für 15 Minuten gesperrt werden.

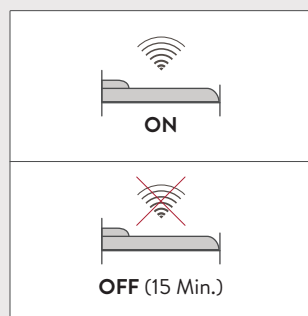

Die Ruffunktion der Actimatt Matratze ist nach 15 Minuten automatisch wieder aktiv. Die Ruffunktion kann bei Bedarf vor Ablauf der 15 Minuten wieder mit der Taste **ON** aktiviert werden.


Die Rückseite des Pflege-Funktionsschalters haftet magnetisch und kann somit am Türrahmen des überwachten Bewohners platziert werden.

Achtung: die Seriennummer des Pflege-Funktionsschalters muss ebenfalls identisch sein mit den restlichen Komponenten.

4 FEHLERSUCHE

Sollte die Funktion des ACTIMATT nicht gewährleistet sein, sind folgende Schritte zu prüfen:

- Ist der Funk-Empfänger im Betrieb (**I/O Leuchte** leuchtet permanent grün)?
- Ist der Funk-Empfänger (2.1) gemäss **Punkt 3.3** korrekt angeschlossen?
- Ist der Funk-Sender (2.2) gemäss **Punkt 3.2** korrekt angeschlossen?
- Stimmen die Seriennummern aller Komponenten (Aktivierungskoffer, Funk-Empfänger, Funk-Sender und falls vorhanden: Pflege-Funktionsschalter) miteinander überein?
- Batteriezustand prüfen, evtl. Batterie erneuern (niedriger Batteriezustand wird durch rotes Blinken der **Quit Leuchte** am Funk-Empfänger (2.1) angezeigt).

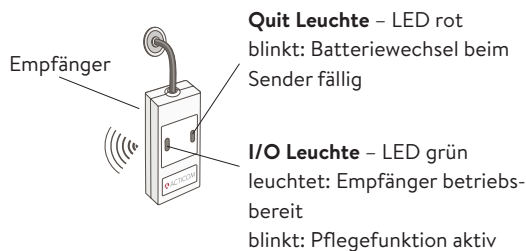

Sind die erwähnten Punkte erfüllt, aber die Funktionen der ACTIMATT ist trotzdem nicht gewährleistet, wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst.

5 HINWEISE REINIGUNG

- Die ACTIMATT-Matratze kann mit handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln mit max. 70 Vol% Alkohol gereinigt werden.
- Keine ätzenden Mittel verwenden.
- Die ACTIMATT-Matratze ist autoklavierbar und dampfdesinfizierbar (Funk-Sender davor von der Matratze entfernen).
- Die ACTIMATT-Matratze trocken, sauber und flach bei 0°C bis +55°C lagern.
- Der Inkontinenzüberzug ist bis zu 95°C waschbar.